

# siegmund®

## Air QUEEN Breeze Mask

### **Sicherheitshinweise**

- Falls es nicht möglich sein sollte, die Maske dem Gesichtsprofil anzupassen, betreten Sie keine Räume mit potentielltem Risiko.
- Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheiten und Tod verursachen.
- Ein angemessen gewähltes Atemgerät ist grundlegend für den Schutz Ihrer Gesundheit. Vor dem Gebrauch der PSA konsultieren Sie eine in Industriehygiene Person oder Experten in Berufsschutz, um die Gebrauchseignung zu bestimmen.  
Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in angemessen belüfteten Räumen mit zum Überleben ausreichendem Sauerstoffgehalt benutzen. Die Grenzwerte bzgl. der Sauerstoffpräsenz in einem bestimmten Umfeld für den Gebrauch dieser Masken können von Land zu Land unterschiedlich sein.  
Bitte beachten Sie die für die Einsatzland geltenden Eckwerte. Es wird in jedem Fall von dem Gebrauch in Räumen abgeraten, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt
- Nicht benutzen wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheits- oder lebensgefährlich sind.  
Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen schwer fällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren.
- Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit dieser filternden Halbmasken verringern.
- Die filternde Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.
- Einweggebrauch. Wartungsfrei.
- Die Halbmaske nach jedem einzelnen Gebrauch entsorgen.
- Die noch nicht benutzten Halbmasken in Ihrer unversehrten Verpackung vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.