


# siegmund®

## Air QUEEN Breeze Mask

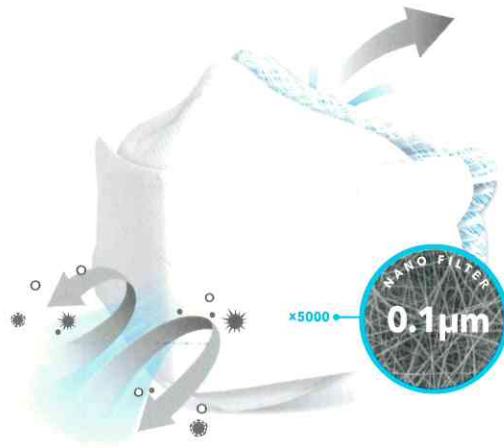

### Gebrauchsanleitung



1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Maske richtig halten und ziehen Sie dann mit zwei Händen an den Ohrschlaufen. Stellen Sie sicher, dass sich der Nasenbügel oben befindet.



2 Legen Sie die Maske unter Ihrem Kinn an.



3 Achten Sie auf einen bequemen Sitz der Ohrschlaufen an Ihren Ohren. Nachdem Sie die Ohrschlaufen um Ihre Ohren gelegt haben, positionieren Sie die Ohrschlaufen für einen bequemen Sitz.



4 Legen Sie Ihre Finger an die Mitte des Metallnasenbügels und bewegen Sie die Finger entlang des Nasenclips entsprechend zu den Seiten, bis der Nasenclip vollständig die Form Ihrer Nasenbrücke hat. Achtung! Das Einstellen des Nasenbügels mit nur einer Hand kann zu Undichtigkeit der Maske führen.



5 Vor dem Betreten des Arbeitsbereichs müssen Sie prüfen, ob die Maske dicht ist:

- I) Decken Sie die Maske mit zwei Händen ab, um die Position der Maske zu fixieren.
- II) Wenn Luft aus dem Nasenrücken austritt, stellen Sie bitte den Nasenbügel gemäß Schritt 4 neu ein. Wenn Luft seitlich der Maske austritt, stellen Sie bitte die Ohrschlaufen neu ein. Wenn die Maske weiterhin undicht ist, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 4.
- III) Wenn die Maske dicht ist, können Sie diese weiter tragen.

[www.siegmund.care](http://www.siegmund.care)